

# Línea Paste Pak GC Fuji

Ionómeros de Vidrio Pasta-Pasta  
Lo Último de La Casa GC

## Mezclas Perfectas Una y Otra Vez




### Simple de usar



Inserte el cartucho Paste Pak en el dispensador y gire para colocar en la posición correcta.



Dispense la cantidad de material deseado.

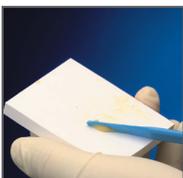

Mezclar con espátula por 10 segundos.

## Línea Paste Pak GC Fuji

La casa GC no sólo tiene los mejores ionómeros de vidrio mundialmente reconocidos por sus características insuperables, sino, que ahora ofrece el novedoso Sistema Dispensador Pasta-Pasta que asegura un apropiado mezclado en cada ocasión que lo use. Cualquier persona puede obtener una mezcla exacta y proporcionada. ¡No más desperdicio! Solamente dispense la cantidad de material necesario y mezcle las dos pastas por 10 segundos y aplique el material. Para una mezcla perfecta una y otra vez usá Paste Pak y olvidate de polvo y líquido.

- Fácil de Mezclar
- Adhesión Química
- Mezclas Exactas
- Minimiza la Sensibilidad
- Mínimo Desperdicio
- Alta Liberación de Flúor

## CEMENTOS



Porcelana  
Fusionada a Metal



Puentes de  
Unidades Múltiples



Inlays de  
Cerámica

## Olvídese de Polvo-Líquido con el Líder Pasta-Pasta

**GC FujiCEM™**  
Cemento de Ionómero de Vidrio Reforzado con Resina  
Para Cementaciones Finales



### GC FujiCEM™ PASTE PAK

GC FujiCEM permite cementar restauraciones indirectas - coronas, puentes, inlays y onlays fabricadas de metal, PFM, porcelana reforzada - libre de metal así como de resina. GC FujiCEM mejora la integridad marginal evitando así microfiltraciones.

- Alta Fuerza de Adhesión
- Alta Liberación de Flúor
- Película de Grosor Mínima
- Minimiza la Microfiltración

**003682 GC FujiCEM paquete Bulk-Granel**  
Contiene: 30 cartuchos de 13.g (7.2 ml) c/u


## RESTAURATIVOS



Clase II



Clase III

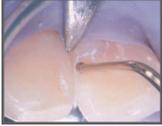

## Eliminador de Sensibilidad Su uso...casi Mandatorio

**GC Fuji LINING™ LC**  
Ionómero de Vidrio para Base o Forro  
Radiopaco - Fotocurable



### GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

GC Fuji LINING LC es usado como una base o forro debajo de compósitos o restauraciones de amalgama y como protección de cavidades preparadas. Además tiene un coeficiente de expansión similar al diente.

- Minimiza la Sensibilidad
- Alta Liberación de Flúor
- Minimiza la Microfiltración
- Radiopaco y Biocompatible

**432571 GC Fuji LINING LC Paste Pak Paquete de Inicio**  
Contiene: 1 cartucho GC Fuji LINING LC Paste Pak de 7.04 g (4.7 ml),  
1 bloque de mezclado y Dispensador Paste Pak.


**001887 GC Fuji LINING LC Paquete de Repuesto**  
Contiene: 1 cartucho de 7.04 g (4.7 ml) de GC Fuji  
LINING LC y bloque de mezclado.

**003682 Fuji LINING LC Paquete Bulk-Granel**  
Contiene: 30 cartuchos de 7.0 g (4.7 ml) c/u

## RESTAURATIVOS



Usar GC Fuji Filling LC  
después de acondicionar  
y secar

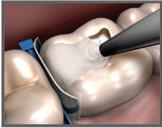

Aplicar GC G-BOND.  
Luego utilizar SOLARE  
(GRADIA DIRECT)  
composite y modelar



Terminar y pulir  
la restauración

## Ionómero de Vidrio... la Base de Seguridad

**GC Fuji Filling LC**  
Ionómero de Vidrio Reforzado Restaurativo  
Reforzado con Resina - Fotocurable



### GC Fuji Filling LC PASTE PAK

GC Fuji Filling LC se utiliza para restauraciones clase III y V, erosiones cervicales, abrasiones y restauraciones en la superficie de la raíz, pero su uso número uno es como base o revestimiento debajo de composites.

- Alta Liberación de Flúor
- Técnica Sandwich Simple
- Incomparable Estética
- Minimiza la Sensibilidad

### GC Fuji Filling LC Kits de Repuesto

Contiene: 1 Fuji Filling LC cartucho de repuesto 8g (3.9 ml)

**002474** Tono A1    **002477** Tono A3.5  
**002475** Tono A2    **002479** Tono CV  
**002476** Tono A3    **002480** Tono Azul

**002481 SELF CONDITIONER 3g (3.2 ml)**

**439881 GC Fuji FILLING LC Paquete Introductorio**  
Contiene: 1 paquete GC Fuji FILLING LC paste pak 8 g (3.9 ml)  
1 Dispensador Paste Pak, 1 Self conditioner 3 g (3.2 ml)

## CEMENTOS



Coloque la banda en el  
diente húmedo  
y presione firmemente  
en su posición



Remueva el exceso de  
material después de su  
colocación



Los alambres niveladores  
pueden ser colocados  
después de 3 minutos

## Bueno para el Diente Bueno para el Paciente

**GC Fuji ORTHO™ BAND**  
Cemento de Ionómero de Vidrio Reforzado con Resina  
Para Cementaciones de Bandas Ortodónticas



### GC Fuji ORTHO™ BAND PASTE PAK

GC Fuji ORTHO BAND está formulado para la cementación de bandas y trabajos de ortodoncia que se retienen con coronas de metal inoxidable o appliances de expansión.

- Fácil de Ver - Fácil de Limpiar
- Perfecta Adhesión
- Alta Liberación de Flúor
- Resistencia a la Compresión

**439460 GC Fuji ORTHO BAND Paquete de Inicio**  
Contiene: 2 cartuchos GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak 13.3g (7.2ml)  
cada uno, 1 Dispensador Paste Pak y 1 bloque de mezclado.

**001888 GC Fuji ORTHO BAND Repuesto**  
Contiene: 2 GC Fuji ORTHO BAND cartuchos de repuesto  
de 13.3g (7.2ml) cada uno