



¡Ver para creer!



Un exclusivo gel
revelador de placa
de tres tonos que identifica
las biopelículas nuevas,
maduras y ácidas.

Tri Plaque ID Gel
de **GC.**



Parte del programa de
Mínima Intervención de GC.

GC



En ocasiones, es necesario ver para creer.

El exclusivo gel Tri Plaque ID de GC no solo puede **diferenciar entre placa antigua y nueva** en unos sencillos pasos, sino también puede **indicar exactamente dónde son más activas las bacterias** revelando el pH ácido. Esta información adicional le será de gran ayuda en la práctica diaria a fin de estimular a sus pacientes para que mejoren su higiene bucal.

Tri Plaque ID Gel =  Pigmento azul  Pigmento rojo  Sacarosa

 Ácidas  Bacterias



PLACA NUEVA

Cuando la biopelícula de una placa es poco densa, el pigmento azul se quita fácilmente con agua y permanece el pigmento rojo que muestra un resultado rojo / rosáceo.



PLACA ANTIGUA (> 48 HORAS)

Cuando la biopelícula de una placa ha madurado, su estructura es densa y, por tanto, los pigmentos azules y el rojos se fijan y forman una capa azul / violeta.



PLACA CON RIESGO MUY ALTO

En la biopelícula de placa con riesgo muy alto, las bacterias acidógenas metabolizan la sacarosa del gel Tri Plaque ID de GC. El ácido resultante reduce el pH de la placa (<pH 4,5), con lo que el pigmento rojo desaparece, dejando un color azul claro.



PLACA CON RIESGO MUY ALTO

Dr. G. Ghani (Reino Unido)

Tres tonos y tres sencillos pasos para garantizar la satisfacción del paciente

1 Aplique el gel con un bastoncillo de algodón, un micro pincel o un algodón.

Enjuague el área con cuidado con agua pulverizada y succione.

2 La placa se muestra en tres tonos:

- azul / violeta: placa antigua (más de 48 horas)
- rojo / rosáceo: placa formada recientemente
- azul claro: placa con riesgo alto

Presentación

004273 tubo de 40 g (36 ml) de gel revelador.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2, Playa de las Americas, 2, 1º, Of. 4
ES -28230 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
http://spain.gceurope.com

3 Después del diagnóstico, lávense los dientes para retirar

En pro de la odontología preventiva, usted y sus pacientes necesitan tener todas las herramientas necesarias a su disposición para gozar de una salud bucodental óptima. El gel Tri Plaque ID de GC puede convertirse en una parte indispensable de su rutina de diagnóstico diaria.

