



Fuerte como una roca

G-ænia!®
Universal
Injectable
de GC

Composite restaurador
de alta resistencia

GC


Fuerte como una roca

Para toda clase de cavidades,
No se requiere capa de recubrimiento

Dr. Ahmed Al-Jaffr, Irak



Radiopacidad de 252 % Al
para un seguimiento
perfecto

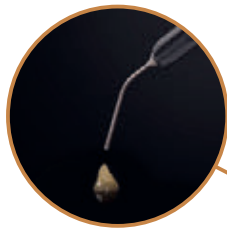

Perfectamente diseñado:
sin flujo de material incontrolado
y fácil separación de la punta




Puntas flexibles
para acceder fácilmente
a cualquier cavidad



Sin descolgamiento:
todo se quedará
donde lo pongas



Extrusión fácil
para una máxima
comodidad

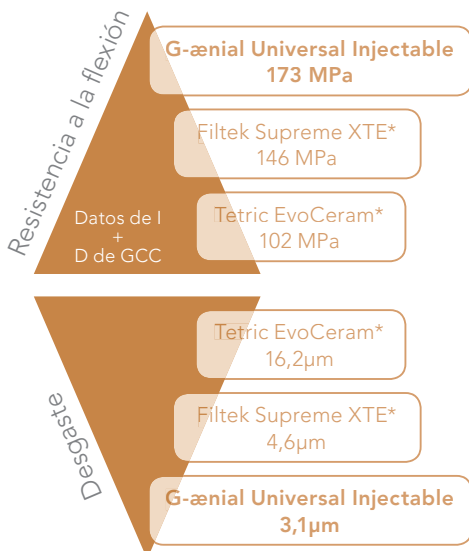


Rellenos de bario
ultrafinos (150 nm)
y alta carga
de relleno

Tecnología de
recubrimiento de
tipo silano de cobertura
total (FSC)
que mejora la
dispersión y adhesión
de los rellenos en
la matriz

Propiedades
excepcionales
No es pegajoso
Baja presión de extrusión
Alta radiopacidad

* no son marcas comerciales de GC

¡Empiece a **inyectar!**

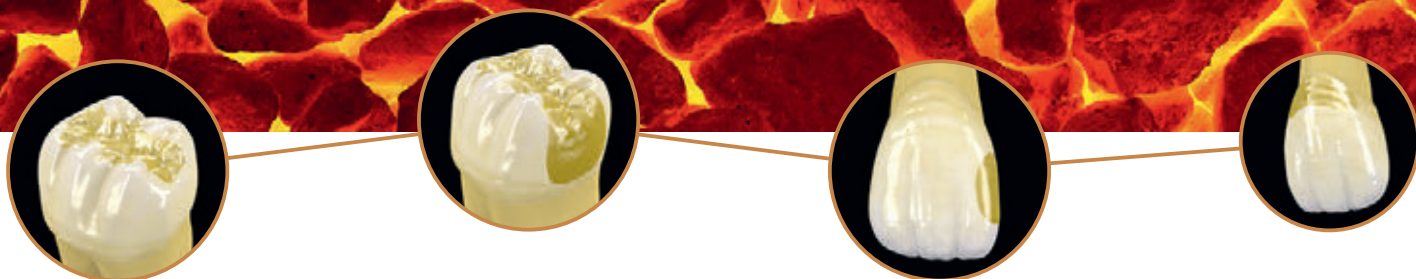

Restauración de **clase II**



Situación inicial que muestra una caries interproximal



Eliminación de la restauración antigua y eliminación de caries



Gracias a las puntas flexibles se puede acceder fácilmente a las socavaduras



Construcción de la pared de la cavidad proximal con el tono de esmalte JE



Eliminación de la matriz seccional después de construir la pared



Ahora se puede seguir un procedimiento de clase I; la capa de dentina se crea con el tono A4



Colocación de la capa final de esmalte con el tono JE



Situación final después del acabado y pulido de los márgenes

Dr. Javier Tapia Guadix, España

Restauración de **clase III**



Cavidades iniciales de clase III



Inyección de G-ænial Universal Injectable (A2)



Resultado postoperatorio inmediato



Recordar la situación mostrando una perfecta integración

Dr. Ahmed Al-Jaff, Irak

G-ænial® Universal Injectable de GC

¡Disfrute de una estética excelente y un brillo duradero!



Dr. Floriann Klumpp, Alemania



Dr. Ali Salehi, Francia

| | Colores estándar | | | | | | | | | | | Colores de interior | | | Colores de exterior | |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|
| | XBW | BW | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | CV | CVD | AO1 | AO2 | AO3 | JE | AE |
| Jeringa 1 ml (1,7g) | 901471 | 901472 | 901473 | 901474 | 901475 | 901476 | 901477 | 901478 | 901479 | 901480 | 901481 | 901482 | 901483 | 901484 | 901485 | 901486 |



901503 - Punta dosificadora
Aguja larga (x30)



Descubra también el adhesivo universal G-Premio BOND de GC:

- 009030 – Kit G-Premio BOND de 5 ml
- 009036 – Reposición de G-Premio BOND, frasco de 5 ml
- 009032 – Reposición de 3 botellas de G-Premio BOND, 3 x 5 ml
- 009034 – Monodosis de G-Premio BOND, 50 unidades

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
http://spain.gceurope.com

