

GC Fuji ORTHO LC

Cemento de Ionómero de Vidrio Reforzado con Resina Fotocurable
Para Cementaciones en Ortodoncia



Bueno para el Esmalte Bueno para el Paciente



La Gran Diferencia

Dentición inmediatamente después de retirar brackets donde fue utilizado un cemento de resina. Es obvio el daño causado por el uso del ácido grabador y cemento de resina sin liberación de flúor.



Dentición inmediatamente después de retirar brackets donde GC Fuji ORTHO LC fue utilizado. Observe el esmalte sano, se previno el dañino uso del ácido grabador y se encuentra sin desmineralización gracias a la alta liberación de flúor de GC Fuji Ortho LC - El Protector de Esmalte.



GC Fuji ORTHO LC

GC Fuji ORTHO LC es un cemento de Ionómero de Vidrio reforzado con resina específicamente formulado para la cementación de brackets y aparatología fija. GC Fuji ORTHO LC tiene la habilidad de ser colocado en presencia de humedad sin necesidad de grabar con ácido fosfórico, simplificando así el procedimiento de adhesión. GC Fuji ORTHO LC es extremadamente durable y permanecerá durante todo el tratamiento. Su alta liberación de flúor previene la desmineralización y promueve la remineralización. Su utilización es tener un Seguro de Éxito.

- Perfecta Adhesión
- No Grabado Ácido
- Previene Desmineralización
- Liberación de Flúor
- Manejo en Ambiente Húmedo
- Fácil de Retirar



Perfecta Adhesión


GC Fuji ORTHO LC tiene una excelente adhesión al esmalte (estructura dental) y metal; también se adhiere muy bien a la porcelana y a las superficies dentales restauradas con resina compuesta. Con un alto nivel de resistencia a las fuerzas de compresión y tensión, GC Fuji ORTHO LC se flexiona bajo tensión para resistir la fuerza de impacto. Y, como todos los ionómeros de vidrio, trabaja perfectamente en un campo húmedo.

Fácil de Retirar

El exceso puede ser retirado con un instrumento manual y después simplemente lave. Cuando finalice el tratamiento, deshidrate el diente para simplificar el retiro de los brackets. En la mayoría de los casos no habrá daño en el esmalte, ni caries secundarias y no se presentaran lesiones de color blanco.

Alta Liberación de Flúor


GC Fuji ORTHO LC provee una liberación de flúor a largo plazo. Esta liberación sostenida y recargable de alta cantidad de flúor ayuda a prevenir las manchas blancas causadas por la placa bacteriana. La liberación de flúor es recargable cuando el paciente usa pasta dental o un enjuague bucal que contenga flúor.

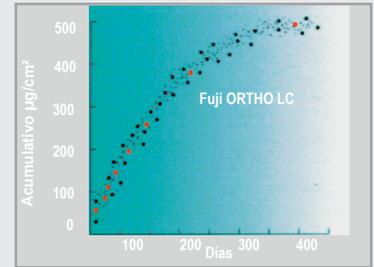


Bueno para el Diente - Bueno para el Paciente



Limpie la superficie dental con piedra pómez y agua

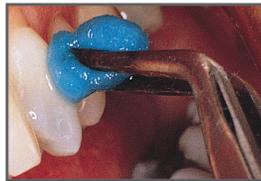

Aplique GC ORTHO Conditioner sobre la estructura dental

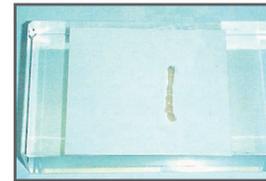

Una vez realizada la mezcla colóquela sobre una loseta de vidrio frío y extenderá el tiempo de trabajo



Aplique GC Fuji ORTHO LC en el bracket a colocar



Cubra el bracket y presione firmemente contra el diente



Fotopolimerize cada bracket 40 segundos

Ultra Conveniente Cápsulas

Prefiera las cápsulas GC Fuji ORTHO LC y encontrará lo último en comodidad y dosis precisas. Son fáciles de usar sin necesidad de mezclar a mano.



Cápsula



Activar



Triturar por 10 segundos



Colocar la Cápsula en el Aplicador



Cementar bracket



Colocar alambre nivelador de tensión

Código del Producto

439451 GC Fuji ORTHO LC Paquete de Inicio
Contiene: 50 cápsulas de 0.30 g polvo y 0.10 g (0.85 ml) líquido c/u, aplicador y GC Ortho Conditioner 25g (23.8 ml).

439450 GC Fuji ORTHO LC Paquete de Respuestro
Contiene: 50 cápsulas 0.30 g polvo y 0.10 g (0.85 ml) líquido c/u

439454 GC Fuji Ortho LC Capsulas Paquete Bulk-Granel
Contiene: 200 Cápsulas de 0.30 g polvo y 0.10 g (0.85 ml) líquido c/u

Código del Producto

439401 GC Fuji ORTHO LC Paquete Introductorio
Contiene: 1 botella polvo (15g), 1 botella líquido 8g (6.8 ml), 1 cucharilla medidora y block de mezcla

439403 GC Fuji ORTHO LC Paquete Estandar
Contiene: 1 botella polvo (40g), 2 botellas líquido 8g (6.8ml), 1 cucharilla medidora y block de mezcla

000030 GC Fuji ORTHO LC Líquido Botella 8 g (6.8ml)
000029 GC Fuji Ortho LC Polvo Botella (40g)
001820 GC ORTHO Conditioner Botella 25g (23.8 ml)

Simple de Usar



Inserte el producto Paste Pak en el dispensador y gire para colocar la posición correcta



Dispense la cantidad de material deseado



Mezclar con espátula por 10 segundos

Mezclas Perfectas Una y Otra Vez



GC Fuji ORTHO™ BAND

Cemento de Ionómero de Vidrio Reforzado con Resina Para Cementaciones de Bandas Ortodónticas

GC Fuji ORTHO™ BAND

GC Fuji ORTHO BAND está formulado para la cementación de bandas y trabajos de ortodoncia que se retienen con coronas de metal inoxidable o aparatología de expansión.

- Fácil de Mezclar
- Mezclas Exactas
- Mínimo Desperdicio
- Fácil de Ver - Fácil de Limpiar
- Perfecta Adhesión
- Alta Liberación de Flúor

