



Se un Héroe COE-COMFORT™ es el Confort del Paciente



"¡Mi Dentista es Grandioso! Estoy muy contenta de que usó COE-COMFORT™. Estaba preocupada de no poder usar mis dentaduras después de la cirugía, pero con COE-COMFORT™, evite la vergüenza y me sentí totalmente cómoda."

Fácil de Usar



Fácil de Mezclar



Fácil de Aplicar



Fácil de Terminar

COE-COMFORT™

COE-COMFORT™ es un acondicionador de tejidos para bases de prótesis, usado para restaurar de forma saludable y recuperar los tejidos subyacentes, afectados tanto por micosis, inflamación o hiperplasia. COE-COMFORT™ permite que los tejidos que soportan la dentadura se recuperen y vuelvan a una condición normal para las futuras toma de impresiones o rebasado de la prótesis. Especialmente útil para la inserción de la prótesis posterior al tratamiento quirúrgico. COE-COMFORT™ contiene undeciclenato de zinc, este compuesto es un anti-séptico, astringente y fungicida que previene el mal olor y el crecimiento de los hongos. COE-COMFORT™ se mezcla en 30 segundos para una fácil aplicación en la dentadura.

- Extremadamente Blando
- Confort Garantizado
- Perfecto para Post-Cirugía
- Fácil de Usar
- Aplicación Inmediata
- Muy Económico



1. Recortar o remover socavados



2. La remoción de los mismos previene laceraciones



3. Lavar la dentadura



4. Secar completamente la dentadura



5. Componentes de COE-COMFORT™



6. Para evitar adhesión use aceite mineral o COE-LUBRICANT



7. Medir 5ml de líquido



8. Medir 6g de polvo



9. Dispensar el líquido en una taza de mezcla



10. Agregar lentamente el polvo al líquido



11. Comenzar a mezclar



12. Mezclar por 30 segundos y dejar reposar por 1 minuto



13. El material debe fluir lentamente de la espátula



14. Utilizar espátula al colocar COE-COMFORT™



15. Aplicar en la dentadura



16. Distribuir el material uniformemente



17. Continuar aplicando en todas las superficies que serán cubiertas



18. Asegurarse de incluir los bordes periféricos



19. Dentadura rebasada lista para la etapa intra-bucal



20. Asentar dentadura en el paciente



21. Remover dentadura del paciente (modelo sólo como ilustración)



22. Lavar completamente



23. Secar completamente



24. Rebasado final y material curado




25. Cortar excesos con bisturí caliente



26. Cortar mediante trazos lisos y continuos



27. Cortar en forma completa los bordes periféricos

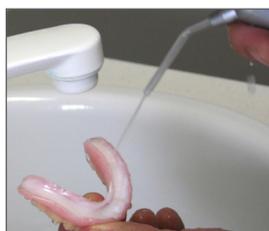

28. Lavar completamente



29. Secar completamente



30. Dentadura rebasada completamente

COE-COMFORT™ Paquete Profesional 341001 Contiene: 6 oz de polvo, 6 oz de líquido y accesorios. 344094 COE Lubricante 5/8oz

COE-COMFORT™ Polvo 341002 Bote de 6 oz 341004 Bote de 5 lbs

COE-COMFORT™ Líquido 341091 Bote de 6 oz 341092 Bote de 1 cuarto (32 oz)

341008 COE COMFORT™ 40-6oz Powder export pack 341094 COE COMFORT™ 20-6Oz Export Pack liquid