

Línea Rebases COE

Acrílicos para Rebases de Protésis Removible
Suaves y Duros



Productos Superiores para un Ajuste Perfecto



Técnica Simple



Remueva la resina de la superficie de la dentadura donde se requiera el revestimiento o rebase.



Mezcle y vacíe en la dentadura cubriendo todas las superficies que están en contacto con la mucosa oral.



Inserte la dentadura e instruya al paciente a que ocluya en posición central. Moldee las orillas y recorte lo que sea necesario. Remueva cuando el material empieza a endurecer.

Línea Rebases COE

Reconocido internacionalmente como los pioneros de rebases, la línea COE de GC America siempre fue y siempre será el líder mundial. Por supuesto, con calidad certificada, selección incomparable y resultados comprobados por décadas no existe ningún equivalente. Para ajustes superiores, más rápidos y más confortables, la línea COE es preferida y utilizada por más odontólogos en el mundo. Pero la razón más importante del éxito de rebases COE es el enfoque de GC America en la satisfacción del paciente - quien nos ha hecho el número uno. ¡Gracias!

- Fácil de Mezclar
- Fácil de Aplicar
- Fácil de Ajustar
- Selección Completa
- Fuerte Adhesión
- Mínima Distorsión

Eliminador de Molestia Suave y Durable

COE-SOFT™
Acrílico para Rebases Suaves



COE-SOFT

COE-SOFT es un material de rebase resistente de curado frío usado cuando el paciente requiere un rebase suave para dentadura superior ó inferior, temporal. COE-SOFT provee un óptimo ajuste de la dentadura y amortigua la presión masticadora previniendo así la irritación del tejido oral. COE-SOFT polimeriza dentro o fuera de la boca en aproximadamente 15 minutos. El rebase dura entre tres y seis meses.

Características

- No contiene monómeros
- No despidе calor, no hay sensación de ardor
- Rebase suave – mas confort para el paciente
- Contiene Undecilinato de Zinc
- Antiséptico, astringente y fungicida
- Previene el mal olor y el crecimiento de hongos
- Se mezcla en 30 segundos

COE-SOFT Paquete Profesional
344001 Contiene: 6 oz de polvo, 6 oz de líquido, y accesorios.
344094 COE Lubricante 5/8oz

COE-SOFT Polvo
344002 Bote 6 oz
344004 Bote de 5 lbs

COE-SOFT Líquido
344091 Bote 6oz
344092 Bote de 1 cuarto

344008 COE SOFT
40-6oz Powder export pack
344096 COE SOFT LIQUID
20-6Oz Export Pack

Confortabilidad del Paciente La Meta de Todos

COE-COMFORT™
Acrílico Acondicionador de Tejido para Acolchonar y Ayudar a Restaurar el Tejido a un Estado Saludable



COE-COMFORT

El auto curable COE-COMFORT es un material utilizado como acondicionador de tejido edéntulo que restaura el tejido a una condición sana. Actuando como un acolchonador para el tejido, una capa de COE-COMFORT permite que el tejido que sostiene a la dentadura se recupere y regrese a su condición normal y sana. COE-COMFORT también puede ser usado como un material de impresión funcional.

Características

- Fácil de aplicar y de mezclar
- Se mezcla en 30 segundos
- Es un material ideal para aplicaciones post-operatorias y colocación de dentaduras inmediatas
- Contiene Undecilinato de Zinc
- Es un antiséptico, astringente y fungicida
- Ayuda a prevenir el mal olor y el crecimiento de hongos

COE-COMFORT Paquete Profesional
341001 Contiene: 6 oz de polvo, 6 oz de líquido y accesorios.
344094 COE Lubricante 5/8oz

COE-COMFORT Polvo
341002 Bote de 6 oz
341004 Bote de 5 lbs

COE-COMFORT Líquido
341091 Bote de 6 oz
341092 Bote de 1 cuarto

341008 COE COMFORT
40-6oz Powder export pack
341094 COE COMFORT LIQUID
20-6Oz Export Pack

Fácil de Usar con Resultados de Precisión

GC RELINE™
Acrílico para Rebases Duros y para Extender Bordes de Dentaduras



GC RELINE

Para ajustes superiores, más rápidos y más confortables GC RELINE es un material de rebase mejorado de auto curado que también puede ser usado para extender los bordes de las dentaduras.

Características

- Más confort y aceptación del paciente
- Menos posibilidad de distorsión
- Requiere menos terminado
- Fluye fácilmente

GC RELINE Paquete Estandar
346001 Contiene: 80 gr de polvo, 50 ml de líquido, 15 gr de agente de mezclado, copa para mezclar, medidores espátula y cepillo.

GC RELINE Polvo
346002 Bote 80 gr
RELINE Líquido
346191 Bote 50 ml

GC RELINE Bonding Agent-Adhesivo
346094 Bote 15 gr

¡Imagínate! Curado en Boca ¡Eso si es Kool!

KOOLINER™
Acrílico para Rebases Duros
Formulado para Reducir el Calor Exotérmico



KOOLINER

KOOLINER es un material para rebases duros que ha sido formulado para reducir el calor exotérmico. Puede ser completamente auto curable en la boca del paciente en aproximadamente 10 minutos.

Características

- Minimiza Distorsiones
- Fácil de Terminar y Pulir
- Más Comodidad para el Paciente
- Se puede usar para extender bordes de la dentadura

KOOLINER Paquete Profesional
345001 Contiene: 3 oz de polvo, 2 oz de líquido, y accesorios.

KOOLINER Polvo
345002 Bote de 3 oz

KOOLINER Líquido
345091 Bote de 2 oz