

GC Gold Label 2 LC

Ionómero de Vidrio Restaurativo Fotocurable
Reforzado con Resina




Usos y Estética Incomparable Galardonado GC Gold Label



Antes

Después

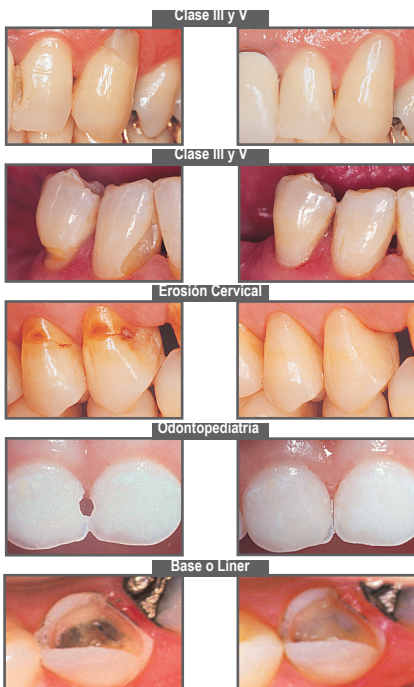

GC Gold Label 2 LC

GC Gold Label 2 LC es un ionómero de vidrio restaurativo reforzado con resina, que ha sido probado clínicamente. Le proporciona todas las ventajas de un ionómero de vidrio tradicional así como importantes avances, tales como el triple curado, terminado inmediato, excelente estética y una técnica simple, que le ahorra tiempo. GC Gold Label 2 LC es perfecto para restauraciones de Clase II, III y V, erosiones cervicales, abrasiones y restauraciones de la superficie de la raíz; pero el uso número uno es como una base o revestimiento en la técnica sándwich.

- Elimina la Sensibilidad
- Previene la Microfiltración
- Protección de Flúor
- Técnica de Sándwich Simple
- Incomparable Estética
- Fácil de Usar



GC Gold Label 2 LC

Combina todas las ventajas de un ionómero de vidrio genuino con las ventajas reforzadas de la resina. Con estética superior, fácil uso y propiedades mecánicas mejoradas hace que cualquier restauración dure más. Previene la microfiltración, provee protección de flúor superior y elimina la sensibilidad.

Elimina la Sensibilidad

Clinicamente comprobado que elimina la sensibilidad preoperatoria y postoperatoria, GC Gold Label 2 LC no sólo se expande y contrae de manera similar a la estructura del diente, sino que se convierte en un protector pulpar y un aislador térmico de la restauración.

Previene la Microfiltración

Es un sellador perfecto. Se adhiere extremadamente bien a la dentina y al esmalte, tiene un coeficiente térmico de expansión similar al diente y es insoluble. Minimiza la posibilidad de microfiltración y deslaves permitiendo que los márgenes queden intactos, manteniendo la unión y el sellado de la restauración.


Traslucidez y Estética Sin Igual

Con 9 tonos Vita, encontrará el color apropiado, es fácil y rápido. Su excelente translucidez permite que GC Gold Label 2 LC combine perfectamente con el color natural del diente obteniéndose así resultados impresionantes.

Protección de Flúor Superior


En contraste con otros productos que contienen aditivos de flúor, GC Gold Label 2 LC ofrece clínicamente significativa protección de flúor. Es recargable de flúor y su excelente sellado marginal ayuda a promover la remineralización. Las investigaciones clínicas han demostrado que la alta liberación de flúor dentro del diente previene las caries recurrentes.

Por estas razones GC Gold Label 2 LC ha sido usado desde hace tiempo para restauraciones pediátricas, geriátricas y ayuda a proteger pacientes con caries rampante y con necesidades de tratamientos de varios niveles.

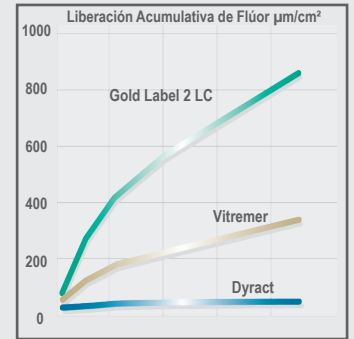


Técnica de Sándwich Simple


Use GC Gold Label 2 LC como una base o un revestimiento para prevenir microfiltraciones en el margen, provee una superior protección de flúor y elimina la sensibilidad.

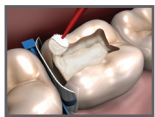


Aplicar Cavity Conditioner por 10 segundos y lavar.

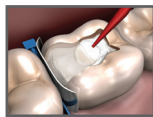

Aplicar GC G-BOND que ayuda a una mejor adhesión y fotocurar 10 segundos.

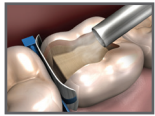


Suavemente secar por 5 segundos.

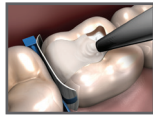


Aplicar SOLARE o GRADIA DIRECT composite y moldear.




Aplicar GC Gold Label 2 LC.

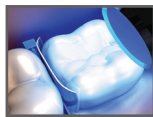

Fotocurar por 20 segundos.

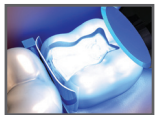

Fotocurar por 20 segundos.

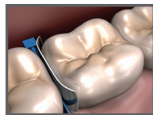

Terminar y pulir restauración.

Extraordinarias Propiedades Físicas y de Manejo

Se obtiene una extraordinaria unión química con la estructura del diente que es micro mecánicamente reforzada, de triple curado (20 segundos de fotocurado; ionómero de vidrio y matriz de resina de auto curado), GC Gold Label 2 LC tiene una alta resistencia de compresión, tensión y flexión que asegura longevidad e integridad. No necesita usar primer para dentina o agentes de adhesión. No necesita secado o tener que esperar. Y no hay necesidad de retenciones mecánicas. La consistencia de GC Gold Label 2 LC lo hace más fácil de colocar y moldear con menos posibilidades de separarse que los compósitos. Y, como todos los ionómeros de vidrio, trabaja perfectamente en un campo húmedo.

Propiedades Físicas

Relación polvo-líquido	3.2g/1.0g	Dureza de la Superficie (Rz)	1.3 um
Tiempo de Trabajo	3 min. 45 seg.	Liberación de flúor ug/cm²	
Tiempo de Fraguado de Fotocurado	20 seg.	1er Día	48.9
Profundidad de Curado (Tono A2)	1.8mm.	1 semana, acumulado	9.8, 119.7
Resistencia a la Compresión (1 día)	242 MPa (10)	6 meses, acumulado	1.6, 543.0
Fuerza de Tensión y Adhesión (1 día)		1 año, acumulado	1.5, 806.6
• Esmalte Bovino	11.3 MPa (1.8)	Recargable de Flúor	Si
• Dentina Bovina	8.2 MPa (0.9)	Radiopacidad	Si
Solubilidad (%)		Biocompatible	Si
• Agua Destilada	0.07		
• 0.001 mol / 1 ácido lácteo	0.24		

Ultra Conveniente Cápsulas

Prefiera las cápsulas GC Fuji II LC y encontrará lo último en comodidad y dosis precisas. Son fáciles de usar sin necesidad de mezclar a mano.



Cápsula



Activar



Triturar por 10 segundos



Colocar la Cápsula en el Aplicador



Aplicar GC Fuji II LC



Fotocurar

Códigos del Producto

GC Gold Label 2 LC Universal Restorative 1-1

Contiene: 1 botella de polvo 15g, 1 botella de líquido 8g (6.8ml), 1 block de mezcla y 1 cucharilla medidora.

002561 Tono A2 002562 Tono A3

002504 Gold Label 2 LC Universal Restorative Líquido

Contiene: 1 botella de líquido 8g (6.8ml)

GC Gold Label 2 LC Universal Restorative Polvo

Contiene: 1 botella de polvo (15g)

002504 Tono A1 002508 Tono A4 002512 Tono C2

002505 Tono A2 002509 Tono B2 002513 Tono C4

002506 Tono A3 002510 Tono B3 002525 Tono D2

002507 Tono A3.5 002511 Tono B4

GC Gold Label 2 LC Universal Restorative Mini

Contiene: 1 botella del polvo 5g y 1 botella de líquido 3g (2.6ml) y 1 cucharilla medidora.

002563 Tono A2 002565 Tono A3.5

002564 Tono A3

000110 Cavity Conditioner

Contiene: 1 botella de 6g (5.7ml)

437555 Cápsula Aplicador III

GC Fuji II LC Repuesto de Cápsulas

Contiene: 200 cápsulas 0.33g de polvo y 0.10g (0.085ml) de líquido cada una

436300 GC Fuji II LC Capsule A1 (200) Bulk/Granel

436301 GC Fuji II LC Capsule A2 (200) Bulk/Granel

436302 GC Fuji II LC Capsule A3 (200) Bulk/Granel

436303 GC Fuji II LC Capsule A3.5 (200) Bulk/Granel

436304 GC Fuji II LC Capsule A4 (200) Bulk/Granel

436305 GC Fuji II LC Capsule B2 (200) Bulk/Granel

436306 GC Fuji II LC Capsule B3 (200) Bulk/Granel

436307 GC Fuji II LC Capsule B4 (200) Bulk/Granel

436308 GC Fuji II LC Capsule C2 (200) Bulk/Granel

436309 GC Fuji II LC Capsule C4 (200) Bulk/Granel