

TEMP ADVANTAGE®

Cemento Libre de Eugenol
Para Cementaciones Temporales



Todo lo que Deseabas Ahora es Realidad!



Fácil de Usar



Preparación



Preparar el provisional
y aplicar
TEMP ADVANTAGE.



Pida al
paciente que
ocluya
normalmente.



Tiempo de trabajo
es de 2 minutos y
es fácil de limpiar.



Restauración
provisional
cementada

TEMP ADVANTAGE®

TEMP ADVANTAGE es el cemento temporal que estabas esperando, con su inigualable fórmula libre de eugenol, compatible con cualquier material provisional. TEMP ADVANTAGE ofrece una gran novedad que lo distingue de los demás cementos temporarios - contiene: Flúor, Nitrato de Potasio y Clorhexidina. La fórmula de TEMP ADVANTAGE es la única y exclusiva a nivel mundial que posee la combinación de estos aditivos. Se usa para cementaciones de restauraciones provisionales simples y múltiples manteniendo una excelente retención.

- Elimina la Sensibilidad
- Fácil de Mezclar
- Efecto Sedativo
- Fácil de Remover
- Reduce Inflamaciones
- Propiedades Perfectas



Todo lo que Deseabas

TEMP ADVANTAGE provee un excelente sellado y minimiza la sensibilidad. Posee una consistencia cremosa que facilita el asentamiento de las restauraciones provisionales. El cemento excedente es fácil de retirar de los márgenes y ofrece una retención efectiva de las restauraciones provisionales.

TEMP ADVANTAGE es completamente compatible y seguro. Se puede utilizar con resinas de acrílico así como con restauraciones de plástico. Es biocompatible con la estructura dental y la pulpa.

No se deteriora ni compromete la integridad de la restauración temporal. Dado a su característica thixotropica - se hace líquido cuando es mezclado y se hace espeso como gel cuando se deja de mezclar. Este cemento permanece firme donde se haya aplicado y a su vez fluye para un excelente manejo.

TEMP ADVANTAGE es un cemento con una extraordinaria fórmula, contiene flúor, clorhexidina y nitrato de potasio, estos aditivos ayudan a la desinfección, reducen la sensibilidad y promueven la remineralización.

Diversos evaluadores independientes consideran esta fórmula extraordinaria como la llave hacia no sensibilidad alguna. TEMP ADVANTAGE recibió 4 puntos y medio de cinco puntos otorgados por THE DENTAL ADVISOR (Vol 21 No 9 - 2004). La facilidad de su uso y su consistencia cremosa fueron destacadas por los editores.

TEMP ADVANTAGE fue calificado con 4 estrellas de cinco estrellas por **REALITY 2007**. **REALITY** es una organización independiente que ofrece soluciones a los problemas, dudas y preguntas de la clínica por medio de evaluaciones objetivas y a la continua investigación en su renombrado centro de investigación.



La Gran Diferencia: Los Tres Aditivos

1. Flúor

Promueve la remineralización, repara el esmalte del diente en las áreas donde ha sido desmineralizado por ácidos. Reduce la formación de caries secundarias en los márgenes. El flúor ayuda a formar una capa protectora adicional.

2. Nitrato de Potasio

Disminuye la sensibilidad del nervio dental con un efecto comparable a la anestesia. Reduce la sensibilidad pulpar a la vez que provee un efecto sedativo. Este ingrediente se encuentra en las pastas dentales para dientes sensibles. Este aditivo se encuentra también presente en sistemas de blanqueamiento.

3. Clorhexidina

Este aditivo trata gingivitis ayudando a reducir la inflamación de las encías y minimiza el sangrado de las mismas. Clorhexidina es un comprobado antibacterial que ayuda a la desinfección y proporciona una mayor y mejor protección en contra de las bacterias.

Manejo Fácil

Muy fácil de manejar gracias a su consistencia cremosa - no pegajosa y en tubos de plástico laminado.



Fácil de Extraer

Dispensado Limpio

Fácil de Mezclar

Consistencia Cremosa

Propiedades Físicas Perfectas

Fuerza de Unión: 23.9 MPa

La Fuerza de Unión es muy diferente con respecto a otros cementos temporales de resina los cuales son difíciles de remover u otros corrientes y económicos con muy poca fuerza de unión. TEMP ADVANTAGE tiene la perfecta Fuerza de Unión para un cemento temporal.

Tiempo de Trabajo 2 min.

El Tiempo de Trabajo es el suficiente para colocar la restauración provisional y hacer ajustes si es necesario ayudando al ahorro de tiempo.

Resistencia a la Compresión (1 día) 10-12 MPa

Retiene la restauración provisional aproximadamente por 30 días mientras provee de un excelente sellado y confort para el paciente.

Mínimo Grosor de Película	15um	Radio de La Pasta	1.3/1.0
Biocompatible	Si	Opacidad (T/0 %)	97

Presentación Tubos

TEMP ADVANTAGE en tubos de plástico laminado ofrece los siguientes beneficios:



- Fácil de extraer del tubo.
- No se hace daños en los tubos como agujeritos.
- Tubo mantiene la forma aún con el uso.
- No chorrea cuando se destapa.
- Presentación Económica

Presentación Jeringas de Automezclado

TEMP ADVANTAGE en Jeringas de Automezclado ofrece los siguientes beneficios:



- Aplicar directamente en la restauración provisional.
- Dispensado Fácil y Conveniente.
- Sin necesidad de Mezclar o Mvedir.
- Ahorra Tiempo.
- Mezcla Perfecta Una y otra Vez.

Códigos del Producto

136509 TEMP ADVANTAGE Paquete de Tubos
Contiene: 1 tubo Base (40g), 1 tubo Catalizador (49g)

136507 TEMP ADVANTAGE Paquete Bulk
Contiene: 4 Jeringas Aplicadoras (7.5g) (Sin puntas)

136505 TEMP ADVANTAGE Paquete Standard
Contiene: 1 Jeringa Aplicadora (7.5g) y 15 puntas de mezclado

136506 Puntas de Mezclado Repuesto
Contiene: 15 puntas de mezclado